



オプティ・フリーTM プラス plus

マルチパーパスソリューション

全ソフトコンタクトレンズ適用 **医薬部外品**

- ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。
- オプティ・フリー プラスTM (マルチパーパスソリューション以下、MPS) はソフトコンタクトレンズの消毒を目的とするものですが、この説明書に記載された使用方法や注意事項にしたがって正しく使用しないと、洗浄・消毒が不完全となり、細菌やかびなどによる目の感染症などの原因となったり、それが進行すると視力を失う危険性も生じます。この説明書に記載された事項は必ずお守りください。
- ソフトコンタクトレンズをご使用になる前に、その添付文書もあわせてよくお読みください。

ハードレンズ(酸素透過性を含む)にはご使用いただけません。

ソフトコンタクトレンズは水分を含有しているため、装着していると涙液中に含まれるタンパク質や脂肪分などがレンズに付着します。この汚れをそのままにしておくと、装着感が悪くなり、細菌やかびなどの繁殖をゆるし、目の感染症を引き起こすことがあります。また、レンズの品質を劣化させることもあります。このようなことを防ぐため、ソフトコンタクトレンズの毎日の洗浄、すすぎ、消毒のケアを正しく行うことが必要です。

使用方法

ステップ1-洗浄(こすり洗い)

あらかじめ石けんなどで手をよく洗っておきます。レンズをはずし、手のひらの上へのせ、本剤を数滴たらし、レンズの両面を各々20秒ほど指でこすり洗いします。

ステップ2-すすぎ

レンズの両面を本剤で、完全に残留物が取り除かれるまで(もしくは20秒間以上)十分にすすぎます。

ステップ3-保存(消毒)

レンズケースに本剤を満し、レンズを完全に浸し、レンズケースのふたを完全に締めます。4時間以上放置しておけば消毒が完了します。本剤ですすいだから、レンズを装用します。

使用上の注意

1.守らなければならないこと

- 1) この説明書に記載してある使用方法を厳守してください。使用方法を誤ると消毒が不完全となり、感染症や角膜潰瘍などの重い眼障害の原因となることもあります。また、それを治療せずに放置すると失明してしまうこともあります。
- 2) レンズを取り扱う前には、必ず石けんなどで手をよく洗いよくすすいでください。
- 3) 使用方法に従い、必ずこすり洗いを行ってください。
- 4) 清潔なレンズケースを使用しないと、雑菌が繁殖し、目の感染や角膜潰瘍などの重い眼障害の原因となることもありますので、レンズを取り出した後のレンズケースは、空にして新しい本剤でよくすすぎ、自然乾燥してください。
- 5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 6) 目に異常を感じなくても、指示された定期検査を必ず受けてください。

2.してはいけないこと

- 1) 本剤はソフトコンタクトレンズの消毒にのみ使用し、飲まないでください。
- 2) 容器の先がコンタクトレンズや指先などに触れると雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがあるのでご注意ください。また、混濁したものや変色したものは使用しないでください。
- 3) 煮沸消毒に使用しないでください。また、他のソフトコンタクトレンズ用消毒剤と併用したり、混ぜて使用しないでください。
- 4) レンズを取り出す際には、使用の都度ケース内の液は捨て、毎日新しい液を使用してください。
- 5) 一度出した液を再びボトル容器に戻さないでください。
- 6) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

3.相談すること

1) 次の人は、使用前に**眼科医**にご相談ください。

- 今までに**目のアレルギー症状**(例えば、目の充血、かゆみ、はれ、発疹、発赤など)を起こしたことがある人
- 眼科医の治療を受けている人

2) 本剤を使用したソフトコンタクトレンズを装用中、または装用後に、**痛み、かゆみ、充血、流涙、目やに、ごろごろ感(または異物感)、灼熱感(焼けつくような感じ)、かすみ目、かわき目、まぶしさ**などの異常を感じた場合には、直ちにレンズをはずし、**眼科医**にご相談ください。そのまま装用し続けると、感染症や角膜潰瘍などの重い眼障害につながる可能性があります。

効能・効果

ソフトコンタクトレンズ(グループI～IV)の消毒

用法及び用量

以下の1)から3)の順序で操作を行う。

- 1) コンタクトレンズをはずし、本剤でレンズの両面を各々、約20秒間洗浄する。
- 2) レンズの両面を本剤で20秒間以上、または完全に残留物が取り除かれるまで十分にすすぐ。
- 3) レンズケースに本剤を満たし、レンズを完全に浸し、ケースの蓋を完全に締める。そのまま4時間以上放置する。

成分

1mL中 塩化ポリドロニウム 0.011mg 含有、安定化剤(エデト酸塩)、界面活性剤、緩衝剤(ホウ酸)、等張化剤、pH調整剤

保管および取扱い上の注意

- 1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 2) 使用後は、キャップをしっかり締めて、直射日光を避け、室温で保管してください。
- 3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えたりしないでください。
- 4) レンズケースは長期間使用していると汚れなどの蓄積により細菌の繁殖をまねくことがありますので、レンズケースは定期的に新しく交換することをお勧めします。
- 5) 容器を開封したら、1カ月を目安に使用してください。
- 6) 開函時に容器のキャップを包んでいるラップが破られていたり、あるいは、はずれていた場合は使用しないでください。

製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル

 **0120-389103**

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日、社休日を除く)



Alcon

製造販売元(輸入元)

日本アルコン株式会社

東京都江東区東陽7-5-8

<http://www.lenscare.jp/>