

オブティ・フリー® スーブラ クレンズ®

タンパク分解酵素洗浄液
全ソフトコンタクトレンズ用
(含ディスボーズブルレンズ)

禁点眼 無菌液



取扱説明書

- ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また必要な時に読めるよう大切に保管してください。
- この説明書に記載された使用方法及び使用上の注意は必ずお守りください。
- ソフトコンタクトレンズをご使用になる前に、その取扱説明書もあわせてよくお読みください。

ソフトコンタクトレンズを装着していると、涙液中のタンパク質やその他の成分がレンズ表面に付着して、薄い被膜が形成されていきます。スーブラクレンズ®タンパク分解酵素洗浄液にはタンパク質を分解する酵素が含まれているので、毎日お使いいただくことでその被膜を分解し、レンズへの蓄積を防ぐことができます。スーブラクレンズは洗浄効果を高めて快適なレンズ装用を実現するとともに、手間を省いた簡単なケアをめざして開発されました。スーブラクレンズはオブティ・フリー®(マルチパーパスソリューション、以下MPS)、またはオブティ・フリー プラス®(MPS)のデイリーケアに加えてお使いいただくことで、レンズをクリーンにリフレッシュさせます。

使用方法

ソフトコンタクトレンズを取り扱う際は、あらかじめ必ず石けん等で手をきれいに洗っておきます。はずしたレンズをオブティ・フリー®(MPS)でこすり洗いし、よくすすいでください。詳細につきましては、オブティ・フリー(MPS)の使用説明書をご参照ください。

- 1.オブティ・フリー(MPS)をレンズケースに満たし、レンズを入れたあと、スーブラクレンズ®タンパク分解酵素洗浄液を左右各1滴ずつ加えます。
- 2.ふたをしっかりとしめ、中の液がよく混ざるようにレンズケースを軽く振ります。
- 3.オブティ・フリー(MPS)の消毒、保存(4時間以上)が完了したらレンズを取り出し、オブティ・フリー(MPS)でよくすすいだから装着してください。
- 4.ご使用後はレンズケース内の液をすべて捨て、ケースを新しいオブティ・フリー(MPS)でよくすすいだから自然乾燥してください(石けんや洗剤は使用しないでください)。本品にはレンズケースがついていますので、レンズをよい状態でご使用いただくためにレンズケースを定期的に交換されることをお勧めします。

オブティ・フリー プラス®(MPS)の場合も同様の使用方法でお使いいただけます。

使用上の注意

- 1.取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。ステップを省略したり、順番を前後させないでください。
- 2.ソフトコンタクトレンズに触れる前に必ず石けん等で手を洗ってください。
- 3.左右のレンズを取り違えることがありますので、レンズは必ず片方ずつ取り扱ってください。
- 4.本品による酵素洗浄には、本製品、またはオブティ・フリー®(MPS)、またはオブティ・フリー プラス®(MPS)に添付されているレンズケースを必ずご使用ください。
- 5.レンズケースにレンズを入れる際は、レンズを傷つけないようにお気をつけください。
- 6.酵素洗浄が終わった後、必ずレンズをすすいだから装用してください。すすぎをしないで装用すると、レンズに汚れが残って痛みや不快感を感じることがあります。
- 7.一度使用したレンズケース内の液は必ず捨て、再使用しないでください。
- 8.点眼、服用はしないでください。もし誤って点眼してしまった場合は、水道水でよく洗い流したあと眼科医にご相談ください。
- 9.衛生上、容器の注ぎ口に指などが触れないようご注意ください。使用後は、キャップをしっかりとめてください。
- 10.直射日光のあたるところや高温になるところは避け、室温で保管してください。

- 11.小児の手の届かないところに保管してください。
- 12.誤用を避け、品質を保持するため、他の容器への入れ替えはしないでください。
- 13.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 14.容器を開封したら、すみやかに使用してください。
- 15.万一、ご使用により目に異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、眼科医にご相談ください。
- 16.スーブラクレンズ®タンパク分解酵素洗浄液はオブティ・フリー(MPS)または、オブティ・フリー プラス(MPS)と併せてご使用いただけます。
- 17.本剤はグループI~グループIVのすべてのソフトコンタクトレンズにご使用いただけます。

主成分:タンパク分解酵素(パンクレアチン)



製品についてのお問い合わせは
オブティ・フリーコール

☎0120-086-123

受付:月~金(祝日を除く)

9:30-12:00/13:00-17:30

<http://www.alcon.co.jp/optifree>

製造販売元(輸入元)

Alcon
JAPAN

日本アルコン株式会社

東京都港区赤坂2-17-7

©2005 Alcon, Inc.

SC05.10I-1-5 2005年10月改訂